

## УНИКАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПАСТА CLEANIC В ТУБАХ

**Dr. S. Zimmer**

профессор стоматологии, Университет Heinrich-Heine,  
Дюссельдорф

Профилактическая паста Cleanic с технологией перлит от компании Kerr является высоко оцененным и общепризнанным продуктом во всем стоматологическом мире благодаря сочетанию низкой абразивности и мощному очищающему воздействию.

Во время проведения процедуры очистки плоские частицы перлита, входящие в состав пасты, в сочетании с насадками Pro-Cup® и щетками Pro-Brush™ удаляют зубной налет и микробную пленку подобно скалеру, после чего они распадаются на более мелкие частицы, идеально подходящие для полирования поверхности зубов. Это объясняет, почему паста Cleanic® обладает мощным очищающим эффектом, который сочетается с низкой абразивностью.

В результате применения пасты достигается высокая степень полировки поверхности твердых тканей зуба, что является ключевым фактором в предотвращении их повторной колонизации микроорганизмами. Таким образом, абразивная система Cleanic® может быть классифицирована как «система с автоматической регулировкой свойств (самонастраивающаяся система)».

Одним из вариантов упаковки пасты является Cleanic® в тубе. Такая форма выпуска позволяет точно дозировать необходимое количество продукта с меньшим перерасходом, например, в тех случаях, когда необходимо удалить налет только в области нижних фронтальных зубов. Паста в картриджах (которая является наиболее традиционной формой выпуска

подобной продукции) зачастую высыхает, особенно в том случае, если крышка закрыта неплотно. Это затрудняет дальнейшее извлечение и использование пасты. Туба позволяет решить все вышеперечисленные проблемы. Пасту Cleanic® из тубы (рис. 1) легко выдавить в необходимом количестве в клипсу-держатель, зафиксированную на пальце врача (рис. 2).

При совместном применении с насадками Pro-Cup® (рис. 3) или Pro-Brush™ (рис. 4) паста приобретает идеальную консистенцию и адгезию к тканям зуба, что облегчает и делает комфортным ее применение.

Для улучшения видимости и доступа ко всем группам зубов во время проведения процедуры профессиональной гигиены полости рта (которая обычно выполняется опытным гигиенистом без помощи ассистента) очень удобно применять роторасширитель OptiView™ (рис. 5). Данное несложное приспособление позволяет пациенту комфортно держать рот широко открытым и облегчает доступ к труднодоступным жевательным участкам зубного ряда (рис. 6).

В заключение необходимо сказать, что профилактическая паста Cleanic® в тубе является удобной формой выпуска хорошо известного продукта, который сохранил также свои классические преимущества, такие как содержание фторида на уровне 1000 ppm в виде фторида натрия. Основными особенностями настоящего улучшения являются эффективное и экономичное использование пасты.



Рис. 1. Паста Cleanic® в тубе



Рис. 2. Простое дозирование пасты в клипсу-держатель



Рис. 3. Применение профилактической пасты Cleanic® совместно с насадкой Pro-Cup®



Рис. 4. Применение профилактической пасты Cleanic® совместно с насадкой Pro-Brush™



Рис. 5. Отличная видимость и доступ благодаря системе OptiView™



Рис. 6. Благодаря системе OptiView™ рот пациента широко открыт, что облегчает доступ к жевательным зубам